

## Elektriska Ställdon till HD - Rullstolar



Denna HD-Rullstol är utrustad med elektriska ställdon för reglering av:

- sitstiltning
- ryggstödsvinkling
- benstödsvinkling höger
- benstödsvinkling vänster

förkryssat alt. gäller denna rullstol Nr. \_\_\_\_\_

### Manöverdosa

Manöverdosan finns i 3 olika versioner:

förkryssat alt. gäller denna rullstol

- typ 2:1 - försedd med 2 tryckknappar för reglering av 1 ställdon ( ej i bild ).
- typ 2:2 - försedd med 4 tryckknappar för reglering av 2 ställdon ( bild 1a ).  
De 2 översta tryckknapparna reglerar ett ställdon ( normalt sitstiltning ) och de 2 nedre reglerar det andra ( normalt ryggstödet ).
- typ 2:4 - försedd med 2 tryckknappar och 1 vred för reglering av 4 ställdon ( bild 1b ).  
Tryckknapparna reglerar det ställdon som väljs med vredets läge ( 3 bild 1b ).  
Vredet reglerar ställdonen i följande ordning med början i läge längst åt vänster,  
sitstiltning  
ryggstödsvinkling  
benstödsvinkling vänster  
benstödsvinkling höger



bild 1a

3

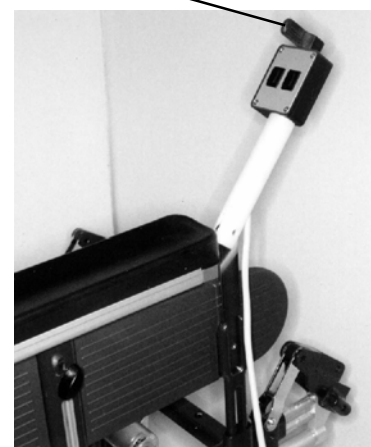


bild 1b

Manöverdosan placeras i urtaget i sidostödets framkant, se 1,bild 1a.

Observera att sladden, 2 bild 1a, ska ligga mellan sätet och sidostödsfästet enl. bild 1a. Se alltid till att sladden ej hänger utanför rullstolen i onödan.

Manöverdosan kan vinklas till önskat läge.

När armstöden tas bort från rullstolen bör även manöverdosan tas bort från armstödet.

**Observera!** Manöverdosan ska hanteras varsamt för att ej komma till skada.

Se vidare nästa sida.

## LADDNING


Om ställdonen används kontinuerligt bör batteriet laddas varje dag, lämpligtvis över natten.

Endast medföljande batteriladdare får användas.

Ladduttaget finns i styrboxen som kan vara placerad enligt följande.

förkryssat alt. gäller denna rullstol

- Styrboxen är placerad under sitsen ( bild 2a ).
- Styrboxen är placerad på tvärröret på rullstolens baksida ( bild 2b ).

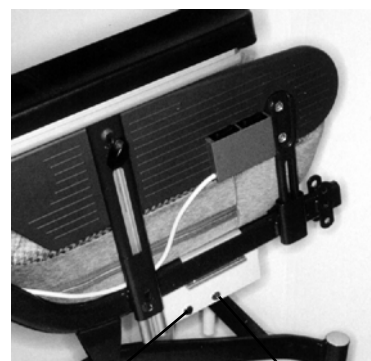

5 bild 2a 4

### Laddningsförfarande:

- Sätt in laddarens laddpropp i ladduttaget ( 4 bild 2a ) resp. ( 6 bild 2b ).
- Sätt in laddaren i vägguttaget.

Det rekommenderas att ladda batteriet ofta för att batteriets livslängd ska bli tillfredsställande.

## SÄKRING

Styrboxen är försedd med en automatsäkring se ( 5 bild 2a ) resp. ( 7 bild 2b ).

Om säkringen löser ut, ( kan ske vid överbelastning eller vid fel ), återställs den när knappen trycks in.

Om säkringen efter återställning åter löser ut eller ofta löser ut är något fel. Kontakta då verkstad.



8 7 bild 2b 6

### OBSERVERA!

Om rullstolen är försedd med ställdon för reglering av sitstiltning eller ryggstödsvinkling ska förlängda tippskydd alltid användas. Detta av säkerhetsskäl. Se 8 bild 2b.

### OBSERVERA!

Denna bruksanvisning bör förvaras tillsammans med rullstolens bruksanvisning.