

Montering av syrgaskorg

Art.nr. 95101

Montering av syrgaskorg på HD-rullstolar typ HD 500 och HD 600

Detta dokument gäller endast för hållare från tillverkare JANMEK, Tingsryd.
Hållarna saluförs bl.a av JANMEK, Waldion AB och AGA Gas AB.

Vi har inspekterat detta och tillåter att det monteras på ovan nämnda rullstolsmodeller inom ramen för bibehållen CE-märkning.

Monteringsanvisning ska tillhandahållas av leverantören.

Följande måste dock beaktas:

- Montering ska göras så lågt som möjligt för att undvika onödig tipp-risk.
- Förlängda tippskydd ska användas.
- Montering kan påverka funktionen och hindra användningen av eventuella tillbehör.
T.ex. avrådes från användning av tillbehören väskkrok, förlängd tippstång och förlängd gasfjäder.
- Bruksanvisningen skall kompletteras med nödvändig information.
- Varningsskylt (-etikett) bör sättas på stolen.

Det åligger montören / ordnatören att bedöma om risken ur säkerhetsaspekt är för stor. Detta varierar från fall till fall. Ökade risker kan ibland kompenseras, exempelvis kan ökad tipp-risk bakåt minskas genom att begränsa sitstipp- och/eller ryggfällningsfunktionen. Om risken bedöms som för stor ska hållaren ej monteras.

Det förutsätts att allt arbete utförs och bedöms av kompetent personal på ett fackmannamässigt sätt.