

MONTERINGSANVISNING

Ekerskydd HD-rullstol

Art.nr. 15 475 24"
 15 476 20"

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta bort skyddsplasten från båda sidor av ekerskyddet.

2. Passa in ekerskyddet

- Passa in ekerskyddet mot ekrarna på hjulets utsida genom att trå det innanför drivringarna. Se till så att hålbilden (a) stämmer med ekermönstret och alla hålpar "träffar" ekrar. Roterar annars till rätt position. Se figur 1.



Figur 1.


3. Montera najbanden

- Montera de tre medföljande najbanden (b) enligt figur 2. Dessa monteras från hjulets insida så att najbandens låshuvud **inte** kommer på utsidan.


OBSERVERA Dra inte åt najbanden helt utan att först kontrollera att ekerskyddet är centrerat.

4. Dra åt najbanden

- Dra åt najbanden och klipp bort överskottet. Se figur 3.

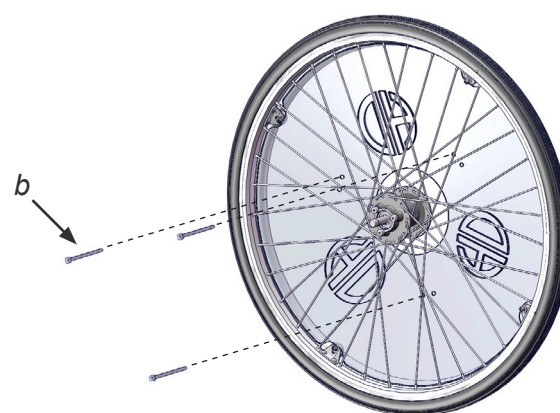

Figur 2.

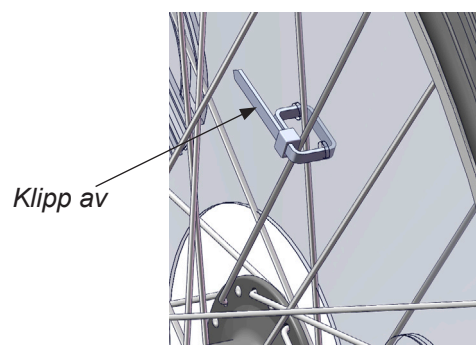

Figur 3.