

**MONTERINGSANVISNING****TIPPLÅSSKYDD**  
**art.nr. 11 050**

Tipplåsskyddet består av en plastkåpa som är avsedd att användas som skydd för tipplåset ( låsenheten för rullstolens sitsvinklinsreglering).  
Skyddet passar på samtliga HD-Rullstolar och är mycket lätt att montera.



1. Vik ut benstöden enl. fig 1 för att förbättra åtkomligheten.  
Om rullstolen är försedd med hel benställning, viks denna upp så mycket som möjligt.



fig. 1

2. Vik upp låshakarna (a) på skyddet enl. fig 2.

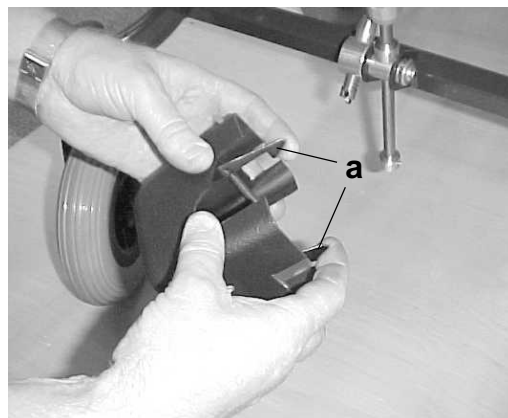


fig. 2

3. Tryck in kåpan över hjulramens tvärrör enl. fig 3.



fig. 3

4. Rikta in kåpan enl. fig 4 och kontrollera att låshakarna greppar runt röret.



fig. 4