

# MONTERINGSANVISNING

Art.nr. 95159

## KÖRHANDTAG Separata ombyggnadssats Art.nr. 10 295



Satsen innehåller följande :

<u>pos.</u>	<u>benämning</u>	<u>antal</u>
3	Handtag	2
4	Bricka	2
5	Skruv	2

Med denna ombyggnadssats ersätts körbygeln (1) som är standard, till separata körhandtag (3).

### Montering:

1. Lossa skruvarna (2) helt och ta bort körbygeln (1).

2. Sätt de separata körhandtagen (3) på plats och montera skruvarna (1).

OBS! Var försiktig vid återmontering av skruvarna och känn att de "tar gäng". Annars kan gängan i fästet bli skadad.

3. Kontrollera att handtagen sitter stadigt.

4. Höjdjusteringssnäppen (A) kan ej användas vid separata körhandtag. Istället används de medföljande skruvarna (5) med brickor (4).

Tryck in låssnäppen och höj körhandtaget c:a 15 mm. I körhandtagsröret finns där ett gängat hål där skruven (5) ska fästas.

OBS! Brickan (4) ska ligga mellan skruven och ryggröret med den välvda sidan mot ryggröret.

Dra åt skruven och känn att körhandtaget sitter stadigt.

