

MONTERINGSANVISNING

RYGGRAM FLEXI med avtagbar dyna

Utförande: SB 45 alt. SB 38

HD Flexirygg är avsedd att användas som alternativt ryggsystem på HD-Rullstolar. Ryggsystemet består av en ryggram med remmar och en speciellt anpassad ryggdyna som fästs med kardborrband. Kan monteras på ryggramar med ställbara ryggor, se 5, bild 2.

Montering på befintlig HD-Rullstol med standard rygg:

A: Demontera ryggbrikan.

1. Lossa först huvudstödsfästet från rygglattan (1) genom att skruva bort skruvarna (3), se bild 2. Vajerreglaget kan sitta kvar på huvudstödsfästet, men se till att inte vajrarna skadas.

2. Ta bort ryggbrikan genom att skruva bort skruvarna (2).


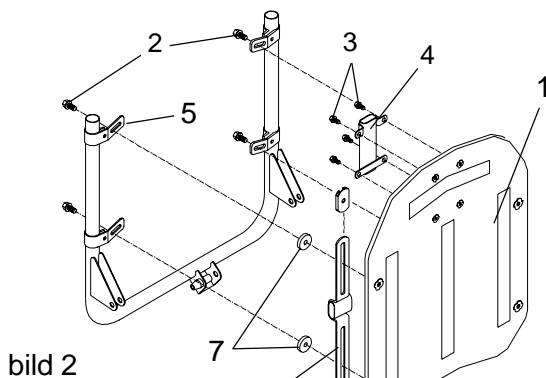


bild 2

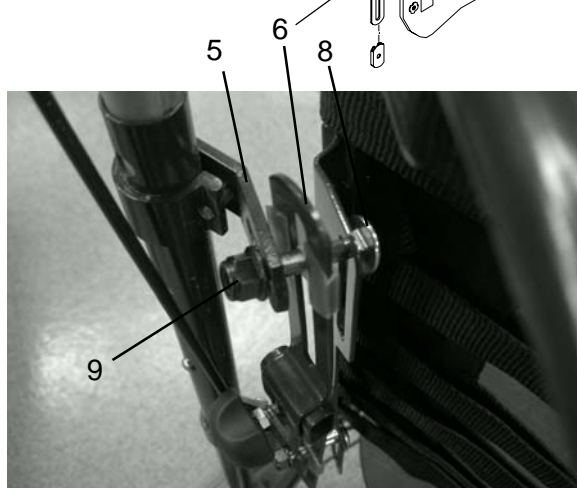

<u>Art.nr.</u>	<u>Benämning</u>
19211	RYGGRAM FLEXI SB 45 Inkluderar: 11860-1 RYGGGRAM FLEXI 12235 RYGGDYNA
19221	RYGGRAM FLEXI SB 38 Inkluderar: 21860-1 RYGGGRAM FLEXI 22235 RYGGDYNA



bild.1

B: Montera flexiryggen:

3. OBS! Ryggram flexi är avsedd att monteras på ryggram med fastskruvade ryggor, se 5 bild 2.

4. Flexiramen monteras fast med de 4 skruvarna (8), bild 3, från ramens framsida genom de vertikala spåren på ramen och genom spåren på ryggramens fästörön (5).

OBS! Bålstödsfästena (6) ska ligga mellan flexiramen och ryggramens fästörön enl. bild 3. Om bålstödsfäste inte finns, används de 4 medföljande brickorna (7) istället.

5. Skruva på låsmuttrarna (9), bild 3. Fäst alla fyra muttrarna innan de dras åt. Se till att skruvarna (8) sitter rätt i spåret på flexiramen.

Ställ in flexiramen (som är ställbar i höjd) och bålstödsfästena (6) i önskad höjd och dra åt låsmuttrarna.

Forts.

6. Skruva fast huvudstödsfästet enl. bild 4 och 5, med de medlevererade skruvarna (10) och muttrarna (11).

7. Montera vajerhållaren (12) på rygg ramen enl. bild 6, och tryck fast vajrarna till reglaget. OBS! Kontrollera att vajrarna ligger innanför ryggröret, se X bild. 6.

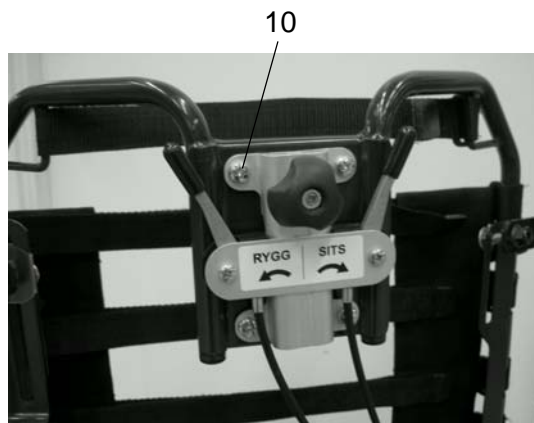


bild. 4



bild 6

X

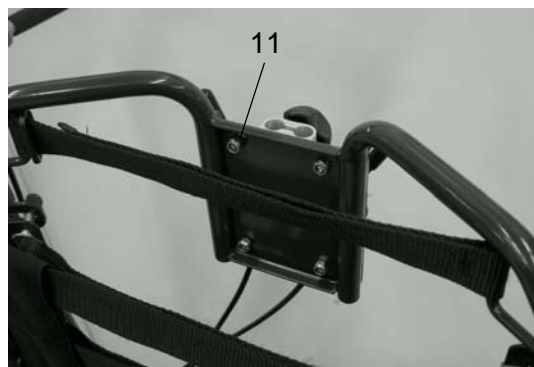


bild 5

RYGGDYNA:

Ryggdynan, se bild 8, placeras på ramen och hålls fast av kardborrband.

Korrekt höjd får man genom att placera dynan så att banden med tryckknappar (13) bild. 9 ligger över den översta remmen (14) på flexiramen. Se till att remmen är sträckt och fäst med tryckknappen



bild 7



bild 8

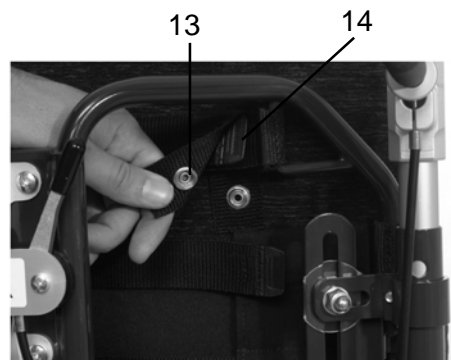


bild 9