

MONTERINGSANVISNING



AMPUTATIONSBEISTÖD

Utförande: SB 45 och SB 38

Höger och vänster

Amputationsbeistöd kan monteras på HD-rullstolar som är försedda med std avtagbara beistöd.

Amputationsbeistödet ersätter det ordinarie beistödet och sätts fast i rullstolens knäled på samma sätt som std beistöd.

Inställning enl. följande:

1. Beistödsröret (1) sätts på plats i knäleden och låses med ratten (2).
2. Vadplattsfästet (3) träs på beistödsröret och låses fast i önskat läge med ratten (4)

3. Vadplattan (5) monteras i fästet genom att vadplattans stång (6) sätts fast i stångfästet (7) och låses fast med skruven (8). 3 hål finns i stängen så att den kan monteras i olika lägen.

4. Vadplattan kan finjusteras genom att lossa något på skruven (9) i vadplattsfästen. Ställ in stångfästet i önskat läge i spåret och dra till skruven.

5. Amputationsbeistödet är vinkelställt på samma sätt std beistöd och hanteras med benvinklinsreglaget på sitsramen.

Art.nr. _____ Benämning _____

18 735-5 AMP.Beistöd vänster SB45-52

18 745-5 AMP.Beistöd höger SB45-52

26 735-5 AMP.Beistöd vänster SB38

26 745-5 AMP.Beistöd höger SB38

Satsen innehåller följande :

Pos	Benämning	Antal
1	Beistödsrör kpl	1
3	Vadplattsfäste kpl	1
5	Vadplatta kpl	1

