

MONTERINGSANVISNING



AVTAGBARA BENSTÖD

Ombyggnadssats

OBS! För att avtagbara benstöd ska kunna monteras måste sitsramens sidorör vara försedd med "öron" enl. skissen nedan (A).

Art.nr.

16 705 Ombyggnadssats senior
26 705 Ombyggnadssats smal senior

Arbetsgång :

1. Demontera den gamla benställningen så att sitsramen blir helt "ren".
2. Montera det nya benvinklinsreglaget enl. följande:
Rensa först hålen A (se skissen) med en 8mm brotsch eller borrh.
Kontrollera att trycktappen (5) löper lätt i hålen.
Stoppa in fjädern (2) i hållaren (6) mitt på sitsramens mellanrör.
Stoppa in låssprinten (1) utifrån, genom sitsramen in i hållaren med fjädern.
OBS! spåret B på låssprinten ska vara utåt.

forts.

Tryck in armen (4) i spåret på låssprinten. Armen ska vara på sitsramens insida.
Stick in trycktappen (5) från utsidan, genom hålet A och in i hålet på armen (4).
Montera låsmuttern (6) och dra fast ordentligt, så att armen ligger an mot planet på trycktappen.
Kontrollera att inget kärvar genom att trycka in tappen.

3. Montera knäleden:

Knäleden består av delarna 10, 11, 12, 13 och 14 enl. skissen nedan. Dessa delar är redan hopmonterade.
Tryck in benvinklinsreglaget och stick in teleskopröret (11) i sitsramen.
Vik ned länken (10) över ledöronen och tryck in ledtappen utifrån genom hålen.
Sätt på brickan (8) och lås fast tappen genom att trycka fast spärrytaren (9) i ledtappens spår.

4. Kontrollera att vinklins- och låsfunktion fungerar tillfredsställande.