

**MONTERINGSANVISNING**

## Benstödslåsning, sats

### Art.nr. 11 752-5

För uppdatering av benstöd med snäpplåsning till skruvlåsning.

#### 1. Montera spärrtappen:

Sätt fjädern (2) över spärrtappen (1).

Tryck in spärrtappen i benstödsrörets hål tills den bottnar helt. Håll kvar tappen med en tång på utsidan av röret ( ej för bred tång). Sätt dit båda brickorna (3) på tappen.

Lägg en droppe lim i ratten (4) på mutterns gänga. ( Använd trögflytande cyanoacrylatlim eller snabbtorkande epoxilim).

Gänga på ratten och dra till ordentligt genom att hålla mot med tången.

Kontrollera att inget lim kommer fram mellan ratten och benstödsröret. Torka i så fall av och stryk ut lite fett på tappen.

Satsen innehåller följande :

| pos. | art.nr.  | benämning       | antal |
|------|----------|-----------------|-------|
| 1    | 11 753   | Spärrtapp gänga | 2     |
| 2    | 81 869   | Fjäder          | 2     |
| 3    | 81 602   | Bricka          | 4     |
| 4    | 81 920-5 | Stjärnratt M6   | 2     |
| 4b   |          | Ingår i 3       |       |
| 5    | 11 759   | Mutterinsats    | 2     |

#### 2. Montera mutterinsatsen (5) i knäleden:

Detta görs enklast genom att använda en kort helgängad M8-bult och en bricka.

Sätt in bulten genom hålet (a) från utsidan av knäleden. OBS lägg en bricka mellan bulten och knäleden. Gänga på mutterinsatsen från insidan och dra in i den i knäleden genom att skruva på bulten.

#### Observera!

Hålet (a) i knäleden får inte vara skadat om mutterinsatsen ska sitta ordentligt.

