

MONTERINGSANVISNING

FÖRLÄNGD GASFJÄDER



Art.nr.

11 105 Gasfjäder förlängd,
kompl. med hållare

Ger ökad ryggvinkling + 30°

std vinkling = 90° - 120°

ökad vinkling = 86° - 136°

OBS! För att ryggreglagevajern ej skall skadas då ryggen fälls helt framåt, bör även denna bytas.


Samma längd som tippåsvajern används.

Art.nr. 11 276-5 Vajer/Hölje tipp std


OBS! Ökad ryggfällning medför även ökad tipp risk! Komplettera därför även med förlängda tramprör/tippskydd.

Art.nr. 14 680 Tramprör förl. par. (mod. 600)

Art.nr. 14 580 Tramprör förl. par. (mod. 500)

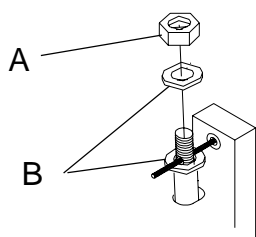

skiss 2

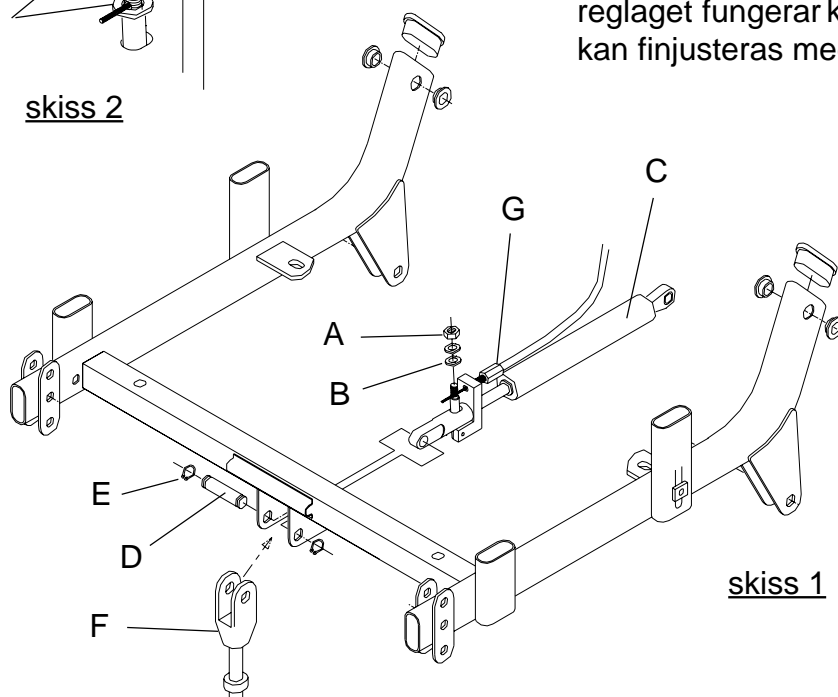

skiss 1

ANVISNING

Byte från std till förlängd gasfjäder:

OBS! Den förlängda gasfjäders ska monteras med hållarens vajeringång vänd uppåt, se skiss 1.

1. Frilägg gasfjäders från ryggramen.
2. Lossa muttern (A) och ta bort gasfjädersvajern (C).
3. Lossa den gamla gasfjäders genom att ta bort en av spårringarna (E) enl. skiss 1. (Använd spårringstång)
4. Dra ut tappen (D) och ta bort gasfjäders. OBS! Samma tapp håller även tippstången (F) på plats. Monteringens förenklas om tappen får sitta kvar i ena sidan på tippstångens fästgaffel.
5. Montera den långa gasfjäders med samma tapp och spårring. OBS! Vänd hållaren enligt bild. OBS! Spänn ej ut spårringen för mycket så att den deformeras och kan lossna.
6. Montera vajern. OBS! Vajern ska klämmas mellan brickorna (B), se skiss 2. Kontrollera vajerns sträckning och att reglaget fungerar korrekt. Utlösningen kan finjusteras med ställskruven (G).