

MONTERINGSANVISNING



Hemiplegiarmstöd

Art.nr. 13 301 (utan sidostöd)
13 303 (vänster)
13 304 (höger)

Armstödet är avsett att monteras på HD-Rullstolar modell 500, 600 och 650 som alternativ till standardarmstöd. Finns i utförande höger (13 304) resp. vänster (13 303) samt utan sidostöd (13 301).

OBS! Sidostödsenheten är ej samma som till standardarmstöden. Sidostödsplattan på hemiplegiarmstödet går längre ner mot sitsdynan för att armstödet lägsta höjd ej ska bli onödigt hög.

OBS! Armstödet skall ej belastas och användas som stöd vid förflyttning i och ur rullstolen.

Placering:

Armstödet sätts på plats på rullstolen på samma sätt som standardarmstöden dvs. i fäströren på sitsramens sida, se bild 2.

Inställningar:

Hemiplegiarmstödet är ställbart i höjd.

Sidoröret (1) är försett med små fördjupningar. Låsbrickan bakom ratten (2) har två kulformade tappar som passar i dessa fördjupningar. Brickan är också fjäderbelastad.

När ratten (2) lossas något kan man lätt känna när låsbrickan kommer i rätt läge när armstödet flyttas upp eller ned i sidostödsbeslaget (3).

När ratten dras till med liten kraft fixeras armstödsröret i en stadig position.

Höjden kan därmed regleras 8 cm i steg om 2 cm.

FÖR 13 301 (utan sidostöd) justeras höjden med den ställhylsa (8) som medföljer (Bild 6).

Se vidare på sidan 2.



Bild 1



Bild 2

OBSERVERA!
Hemiplegiarmstödet får ej ställas högre än det högst markerade läget.

Hemiplegiarmstödet är steglöst ställbart till maximal inåt- eller utåtrotation i axeln.

Armstödet kan roteras till lämpligt avlastat viloläge för armen/axeln.

Fixera positionen med vredet (4) under armstödet. Se bild 3. För att lättare komma åt kan vredet dras ut (fjäderbelastat) och roteras till önskad position.

Vid montering av armstödet, se till att sidoröret (1) ansluter ordentligt till armstödet hylsa så att låsskruven (4) träffar spåret (6) i sidorörets övre del. Se bild 3 och 4.

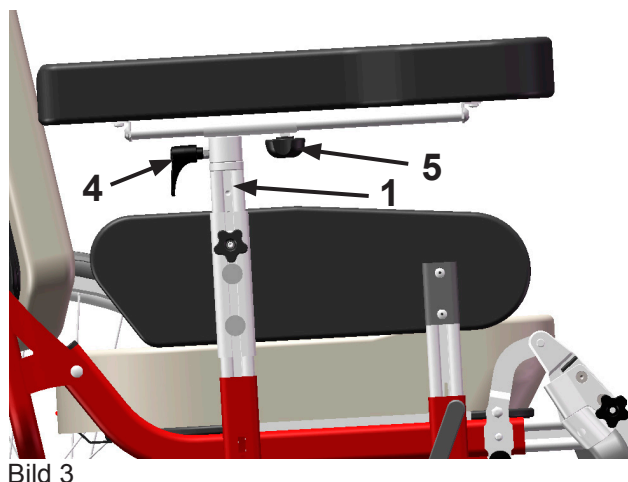


Bild 3

Hemiplegiarmstödet är steglöst ställbart i djup, 10 cm bakåt och 12 cm framåt.

Skjut armstödet framåt eller bakåt längs skenan under armstödet till lämpligt avlastat viloläge för armen/axeln.

Fixera positionen med skruven (5) under armstödet. Se bild 3 och 5.

Hemiplegiarmstödet är ställbart i bredd och kan flyttas ut eller in mot kroppen.

Armstödet är monterat i medelläge vid leverans och kan flyttas:

- från medelläge ut från kroppen 2 cm
- från medelläge in mot kroppen 2 cm

Montering sker genom att skruvarna (7) flyttas i fästet under armstödet till yttre eller inre position. Obs! Skruvarna skall efter montering kontrolleras och vara väl åtdragna. Se bild 5.

Skötselråd:

Klädseln torkas av med fuktig trasa eller tas av och tvättas i maskin.

Se tvättråd i klädseln.

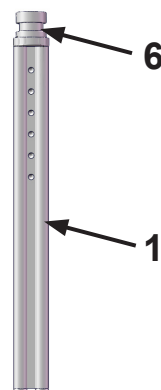


Bild 4

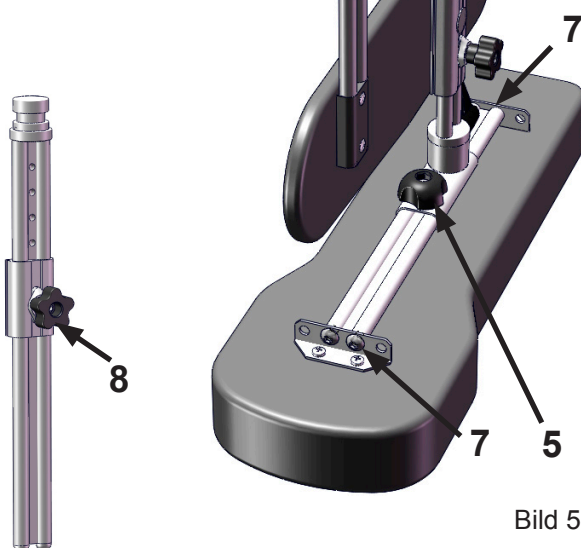


Bild 5

Bild 6