

MONTERINGSANVISNING



HJULBREDDNINGSSATS

Art.nr. 14 501-9

Satsen innehåller följande delar:

- | | |
|----------------------|------|
| 1. Breddningsadapter | 2 st |
| 2. Hjulaxel förlängd | 2 st |
| 3. Spårring SGA 12 | 2 st |
| Bromstapp lång | 2 st |
| (se baksidan) | |

Genom att byta hjulaxeln och montera en adapter flyttas hjulet ut 20 mm.

Ta först bort den gamla hjulaxeln:

- Lossa täckpluggen (4).
- Lossa spårringen (3).
- OBS! Till detta krävs specialverktyg, spårringstång.
- Dra ut hjulaxeln.

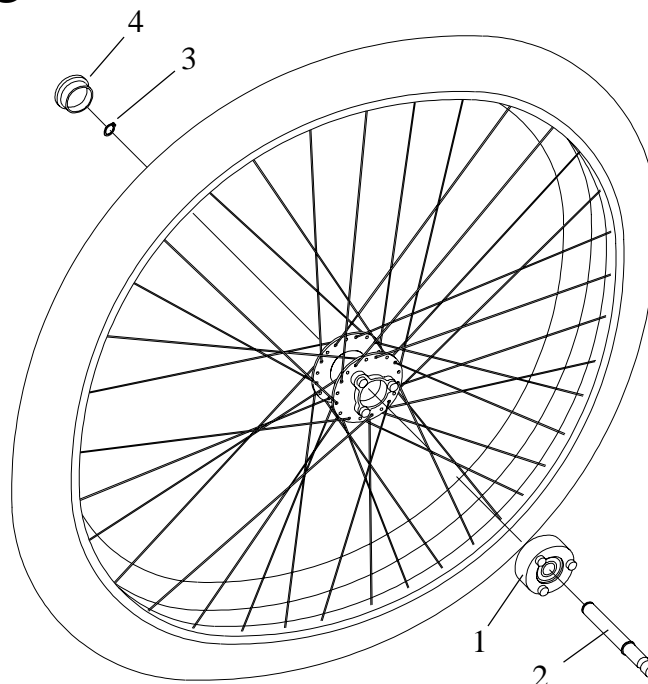


fig. 1

Montera adaptern enl. följande:

- Placera adaptern på hjulnavets insida så att tapparna på hjulnavet (a) passar i adapters uttag, se fig. 2.
- För hjulaxel genom adaptern (1) och hjulnavet (5)
- Vid behov knacka **lätt** på hjulaxeln.
- Montera spårringen (3) så att hjulaxeln låses.

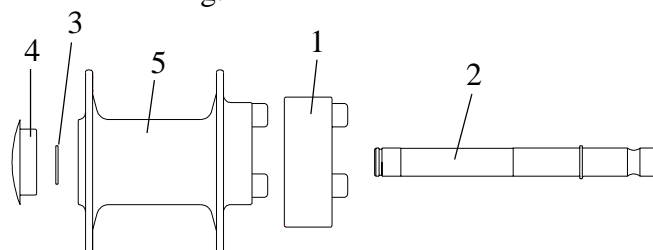


fig. 2

OBS! Kontrollera att spårringen sitter korrekt i spåret på hjulaxeln.

- Kontrollera att hjulaxeln är låst genom att knacka lätt på hjulaxelns utsida.
- Sätt tillbaka täckpluggen (4).

Vänd för montering av förlängd bromstapp.

OBSERVERA!

Vid montering av spårringar är det mycket viktigt att dessa behandlas riktigt. Om spårringen öppnas för mycket kan den deformeras och låser därefter inte korrekt. Defekta spårringar måste bytas. se fig. 3

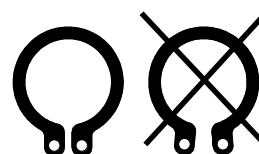
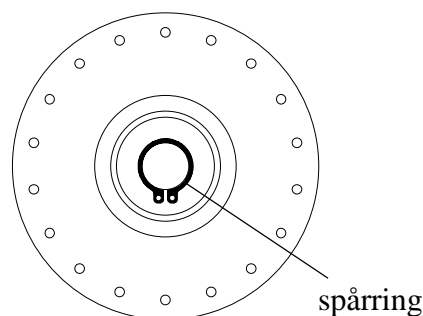


fig. 3

HJULBREDDNINGSSATS Art.nr. 14 501-9

När hjulbreddningssats har monterats bör även parkeringsbromsens bromstapp bytas till den längre varianten.

Ta bort den befintliga bromstappen (a) genom att lossa skruven (c).
Montera den långa bromstappen (b) med samma skruv på motsvarande sätt.
Dra till skruven ordentligt.

OBS!
Prova bromsfunktionen efter montering.

