

LÄNKHJULSADAPTER

Komplett SATS



för hjulram med 12 mm länkhjulslager

Art.nr. 14 510 (inkl länkhjul)

Art.nr. 14 511 (utan länkhjul)

MONTERINGSANVISNING

Satsen innehåller följande delar:

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. Länkhjulsadapter | 2 st |
| 2. Bult | 2 st |
| 3. Bricka | 2 st |
| 4. Kupollåsmutter | 2 st |
| 5. Länkhjul 125 mm inkl gaffel | 2 st |

Satsen är avsedd för HD-Rullstolar med 12 mm länkhjulslager. För äldre stolar med 1/2" länkhjulslager finns en speciell sats.

Innan montering skall hjulramen inspekteras så att eventuella skador eller bristningar upptäcks. **Adaptorn får inte monteras på defekt hjulram.**

Monteringsgång:

- Ta bort de befintliga länkhjulen på rullstolen. Kullagren i lagerhylsan (8) **skall** sitta kvar.
- Kontrollera att skruven (6) i adaptorn (1) är utskruvad c:a 10 mm.
- Montera adaptorn enl. fig. 1b. (Adaptorn och länkhjulet är redan ihopmonterade).
- Se till att adaptorn monteras i vinkel enl. fig. 1a.
- Dra åt muttern (4) med hylsnyckel och håll samtidigt bulten (2) med insexnyckel. Dra åt hårt, helst med momentnyckel c:a 75 Nm.
- Skruva in skruven (6) (med insexnyckel helt in i adaptorn, c:a 2 mm innanför kanten.

OBS! Kontrollera och provkör rullstolen innan den tas i bruk.

