

LÄNKHJULSADAPTER

Komplett SATS

för hjulram med 1/2" lager

Art.nr. 14 510-9 (inkl länkhjul)

Art.nr. 14 511-9 (utan länkhjul)



MONTERINGSANVISNING

Satsen innehåller följande delar:

1. Länkhjulsadapter	2 st
2. Bult	2 st
3. Bricka	2 st
4. Stödbussning	2 st
5. Kupollåsmutter	2 st
6. Länkhjul 125 mm inkl gaffel	2 st

Satsen är avsedd för HD-Rullstolar med 1/2" länkhjulslager. För nyare stolar med 12 mm länkhjulslager finns en speciell sats.

Innan montering skall hjulramen inspekteras så att eventuella skador eller bristningar upptäcks. **Adaptorn får inte monteras på defekt hjulram.**

Monteringsgång:

- Ta bort de befintliga länkhjulen på rullstolen. Ta bort länkhjulslagren.
 - Kontrollera att skruven (6) i adaptorn (1) är utskruvad c:a 10 mm.
 - Montera adaptorn enl. fig. 1b. (Adaptorn och länkhjulet är redan ihopmonterade). Stoppa in stödbussningen (4) i länkhjulsröret.
- Bussningen är avfasad för rörets invändiga svets.
- Se till att adaptorn monteras i vinkel enl. fig. 1a.
 - Dra åt muttern (5) med hylsnyckel och håll samtidigt bulten (2) med insexnyckel. Dra åt hårt, helst med momentnyckel c:a 75 Nm.
 - Skruva in skruven (6) (med insexnyckel helt in i adaptorn, c:a 2 mm innanför kanten.

OBS! Kontrollera och provkör rullstolen innan den tas i bruk.

