

# MONTERINGSANVISNING



## RYGGBRICKA mörkgrå för avtagbara dynor

Utförande: Senior / Smal / Barn  
Standardhöjd och förlängda

Ryggbrickan är avsedd att användas på HD-Rullstolar för användning av avtagbara sitsdynor från Hantverksdesign och är försedd med kardborrband.

Brickan kan även användas för fastsättning av andra dynsystem, exempelvis formgjutna ryggar och liknande.

OBS! Hantverksdesign tar inget ansvar för dynor från andra leverantörer.

Art.nr.	Benämning
<u>12 215-1</u>	RYGGBRICKA SR
<u>22 215-1</u>	RYGGBRICKA SM
<u>32 215-1</u>	RYGGBRICKA Barn
<u>12 216-1</u>	RYGGBRICKA SR +10 cm
<u>22 216-1</u>	RYGGBRICKA SM +10 cm
<u>12 217-1</u>	RYGGBRICKA SR +20cm
<u>22 217-1</u>	RYGGBRICKA SM +20cm

### Montering:

-Ryggbrickan skruvas fast med de 4 skruvarna (2) från ryggramens baksida genom spåren på ryggramens fästörön (6).

OBS! Bålstödsfästena (7) ska ligga mellan ryggbrickan och ryggramens fästörön. Om bålstödsfäste inte finns, används de 4 brickorna (8) istället.

- Fäst alla fyra skruvarna innan de dras åt.

- Rikta in ryggplattan (1), ställ bålstödsfästena (7) i önskad höjd och dra åt skruvarna.

- Skruva fast huvudstödsfästet med skruvarna (3).

På ryggplattans baksida finns en klammer avsedd för vajerreglagets vajrar.

- Kontrollera att plattan sitter stadigt.

OBS!

Bålstödsfäste (7) och huvudstödsfäste (9) ingår ej i satsen.

Satsen innehåller följande :

Pos	Benämning	Antal
1	Ryggbricka	1
2	Skruv M8	4
3	Skruv M6	4
8	Bricka plast	4

