

## MONTERINGSANVISNING



### SITSPLATTA svart för avtagbara dynor

Art.nr. 12 111-1 Senior bredd 45 cm

Art.nr. 22 111-1 Smal bredd 38 cm

Art.nr. 32 116-1 Barn bredd 38 cm

Sitsplattan är avsedd att användas på HD-Rullstolar för användning av avtagbara sitsdynor från Hantverksdesign. Plattan kan även användas för fastsättning av andra dynsystem, exempelvis formgjutna sitsar och liknande.

OBS! Hantverksdesign tar inget ansvar för dynor från andra leverantörer.

Satsen innehåller följande :

<u>pos.</u>	<u>art.nr.</u>	<u>benämning</u>	<u>antal</u>
	<b><u>12 111-1</u></b>	<b><u>SITSPLATTA SR</u></b>	
	<b><u>22 111-1</u></b>	<b><u>SITSPLATTA SM</u></b>	
	<b><u>32 116-1</u></b>	<b><u>SITSPLATTA BARN</u></b>	
1		Sitsplatta	1
2		Skruv M6x50	2
3		Skruv M5x20	2
4		Distans plast	2
5		Bricka	4
6		Låsmutter M6	2
7		Bricka	2
8		Låsmutter M5	2

#### Montering:

1. Tryck in skruvarna genom hålen i sitsplattan (1) och passa in dessa i monteringshålerna på sitsramen. Glöm ej brickorna mellan skruv sitsplatta.

OBS! Distansbrickorna (4) ska ligga mellan sitsplattan och sitsramens mellanrör.

2. Skruva fast med låsmuttrarna. ( Verktøy medföljer ej)

3. Kontrollera att plattan sitter stadigt.

