

FÄSTE Transportsäkring

Art.nr. 13 550 resp. 13550-5



MONTERINGSANVISNING

Satsen innehåller följande delar:

	art.nr 13550	art.nr 13550-5
1. Fäste	4 st	2 st
2. Bricka	4 st	2 st
3. Skruv	8 st	4 st

Transportsäkringsfästena är avsedda att monteras på HD-Rullstolar.

Använd sats 13550-5 om endast 2 fästen för montering bak önskas.

OBS! Fästena får endast monteras på rullstolens hjulram.

Montera enl. följande:

- Placera fästet (1) på hjulramens sidorör enl. fig. 2.
- Skruva fast brickan (2) med skruvarna (3) enl. fig. 3.
(Använd fsat nyckel storlek 13 mm.)
- Dra åt ordentligt.

När skruvarna dras åt, låser man fast fästet på hjulramen.

Fästet kan även monteras med brickan på hjulramens översida och insida, se fig. 4.

Hur fästena ska monteras avgörs av respektive fordons spännbandsystem. På baksidan finns anvisat lämpliga monteringspunkter för olika modeller.

Vilka spännband som används och hur dessa fästs varierar med fordon.

OBSERVERA!

Spänn ej för hårt!

Spännbanden ska endast hålla kvar rullstolen i position. För hårt tryck kan medföra skador på rullstolen.

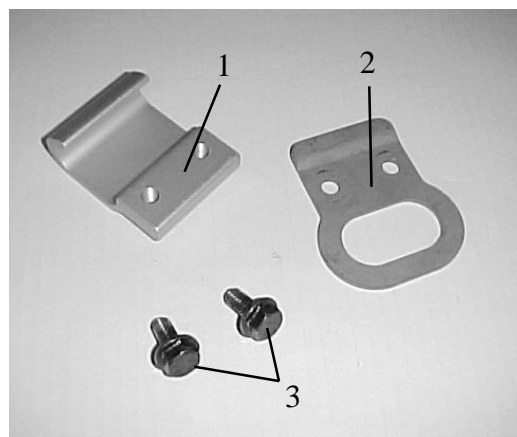


fig. 1



fig. 2

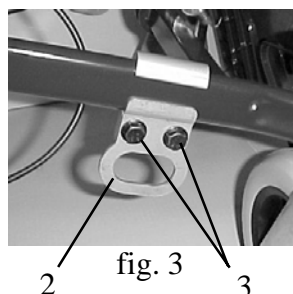


fig. 3



fig. 4

OBSERVERA!

Dessa fästen är endast avsedda att fixera rullstolen vid färd i fordon.

Säkerhetsbälten för rullstolsanvändaren måste alltid fästas direkt i fordonet, i fästpunkter avsett för detta.

Lämplig placering av transportfästen

Modell HD 600


Bakre fästena (1) placeras något framför hjulinfästningen.

Monteras från insidan.

1

Främre fästena (2) placeras strax bakom hjulramens mellanrör.

Monteras från utsidan.

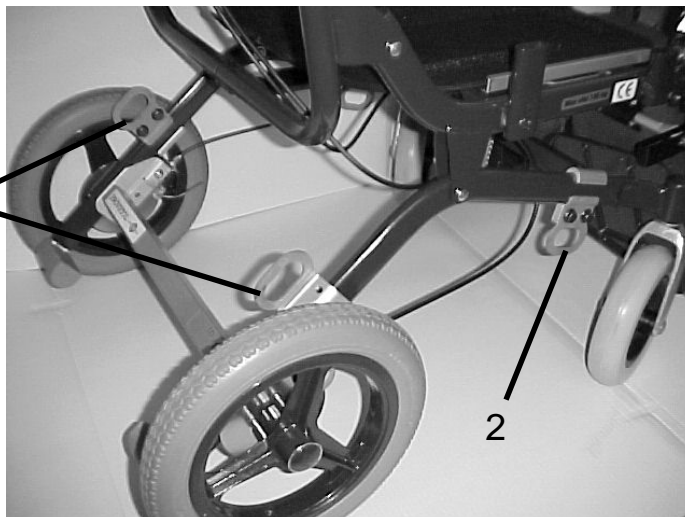

Modell HD 500

Bakre fästena (1) placeras något efter bocken på hjulramens sidorör.

Monteras från insidan.

Främre fästena (2) placeras strax bakom parkeringsbromsen.

Monteras från insidan.



1



2

OBSERVERA! Spänn ej spännband för hårt!

Spännbanden ska endast hålla kvar rullstolen i position.

För hårt tryck kan medföra skador på rullstolen.