

MONTERINGSANVISNING

Mont. / Byte av Bålstödsfästen art.nr. 13190-5

Bålstödsfästet (a) (bild 1) ska monteras mellan ryggramens öra (b) och ryggplattan (c) och med plastbrickan (d) på plats mellan dessa.

Observera att fästena är i höger och vänster utförande och är normalt märkta på baksidan. Bålstödsfästet placeras som bilden visar med den kortare slitsen uppåt och kan justeras i höjd när skruvarna (e) och (f) är något lossade. Detta ger ett normalt inställningsområde för bålstöden höjd. Om ännu lägre inställning av bålstöden önskas kan fästena vändas så att den långa slitsen kommer uppåt. OBS! i detta läge måste höger fäste placeras på stolens vänstra sida och vänster fäste på höger sida.

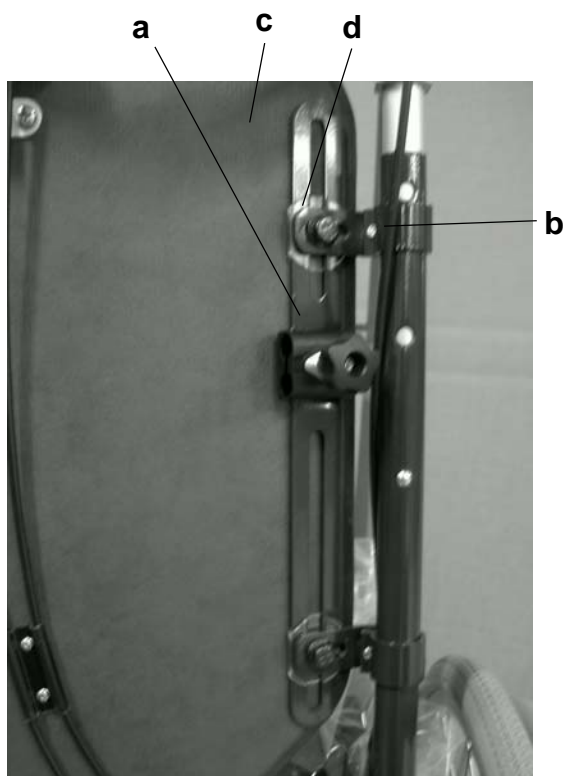


bild 1



bild 2

Instruktion vid byte av fäste

- Lossa först skruven (f) något men ej helt. Lossa skruven (e) helt.
- Vrid ut bålstödsfästet (a) och låt det hänga i den undre skruven (f) enl. bild 2.
- Montera det nya fästet med den övre skruven (e) men skruva inte åt helt.
- Lossa den undre skruven (f) helt och ta bort det gamla fästet.
- Montera det nya fästet med den undre skruven (f).
- Ställ in fästet i önskad höjd och dra åt skruvarna.

OBS! Glöm ej att dra åt skruvarna (e) och (f) då dessa även håller ryggplattan på plats.