

## MONTERINGSANVISNING

### Mjukt knäledsskydd

Art.nr. 45 560 (par)

#### MONTERING:

1. Börja med att sätta fast den självhäftande kardborrebiten på insidan av knäleden enligt bild 1.
2. Trä sedan på knäledsskyddet över knäleden som visas på bild 2. Se till att kardborren på insidan av skyddet träffar den ditklistrade biten.
3. Dra därefter resårbanden runt knäleden och fäst på utsidan, se bild 3. Justera in så att skyddet sitter i en bra position.

#### SATSEN INNEHÅLLER:

Knäledskydd höger	1st
Knäledskydd vänster	1st
Självhäftande kardborrband	2x8cm



Bild 1, klistra fast kardborren enligt bilden.



Bild 2, trä på knäledsskyddet.



Bild 3, trä resårbanden runt knäleden och fäst på utsidan.