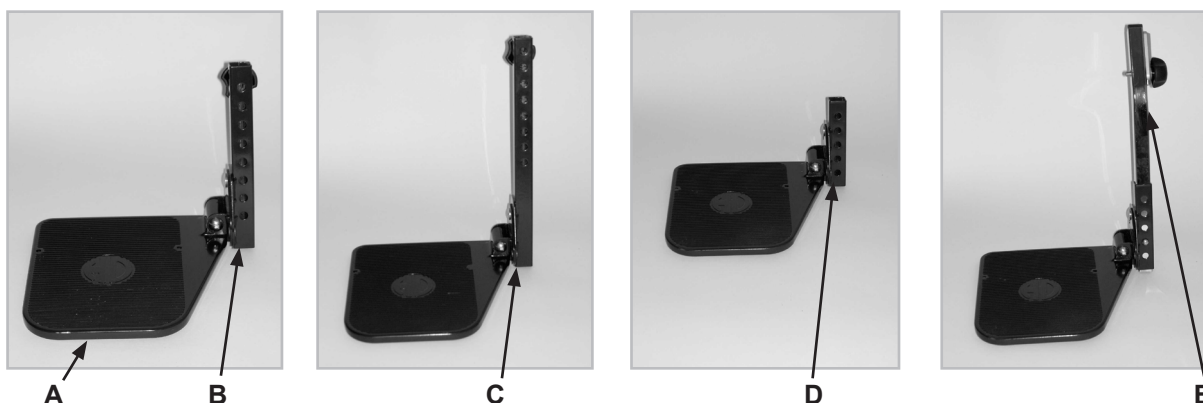


Delade fotstöd

Infoblad nr. 13


Delade fotstöd


Består av två delar, fotplatta (A) och fotplattehållare (B). Fotplattehållarna finns i tre olika längder; standard (B), förlängda +10 cm (C) och avkortade -8 cm (D).

Fotplattehållare avkortad måste kombineras med benstödsrör avkortat (barn) (E) för att erhålla kort benstödslängd -8 cm, se artikelnummer sida 2.

Fotstöden kan höjas och sänkas separat stegvis med snäpplås (F). Fotplattorna är uppvikbara för att enklare komma i och ur rullstolen (G).

Fotplattornas vinkel kan regleras (ca 15°) separat genom att muttern vid fotplattans infästning lossas och önskad fotvinkel ställs in och muttern dras åt (H).

Verktyg – fast nyckel 10 mm. (Sitter med kardborrband under sitsplattan.)

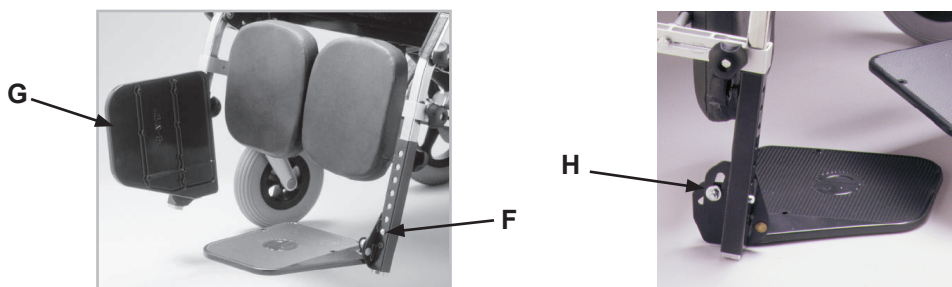

Mått

Fotplattehållare standard	8 hål	längd 20 cm
Fotplattehållare förlängda	8 hål	längd 30 cm
Fotplattehållare avkortad (barn)	5 hål	längd 12 cm

Fotplattor sb 45/52	bredd 16 cm	djup 21,5 cm
Fotplattor sb 38/barn	bredd 12 cm	djup 21,5 cm

Avstånd sitsdynans överkant till fotplatta

Standard	40 - 54 cm	
Förlängda	50 - 64 cm	
Avkortade	32 - 41 cm	I kombination med benstödsrör avkortat/barn (E) se artikel nummer sida 2.

Delade fotstöd

Infoblad nr. 13

Tänk på

Delade fotplattor kan kombineras med alla HDs benstödsrör, standard, 90° och raka benstödsrör.

När förlängda fotstöd används kan sitshöjden behöva höjas för att fotplattorna inte ska gå i golvet. Sitshöjden kan höjas 5 cm med sitshöjningsadapter (art nr 14190-1). OBS adaptern ska monteras av fackman.

Om förlängda fotstöd används med snäpplåset i nedersta läget (utan sitshöjningsadapter monterad på rullstolen) måste benstöden vara framåtvinklade till ca. 120° knävinkel eller rullstolen vara tiltad ca. 10° bakåt för att gå fritt från golvet.

För att erhålla maximal avkortning, -8 cm av benstödshöjden ska avkortade fotstöd kombineras med avkortade benstödsrör se nedan för artikel nummer.

Som alternativ kan fotplattorna monteras bakvända. Krävs att 5" länkhjul och länkhjulsadapter monteras för att länkhjulen inte ska slå emot fotplattorna. Detta alternativ kan fungera för brukare som på grund av böjkontraktur i knäleden får in fötterna inunder rullstolen.

När Du ställt fotstödet i önskad höjd med snäpplåset kan Du med ratten på baksidan av fotplattehållaren låsa fotstödet. (Gäller ej avkortade / barn.) Genom att låsa fotstödet minskar också eventuella vibrationsljud mellan rören vid körning på ojämnt underlag.

Art.nr

Benämning

11 907	Fotstöd standard sb45-52 par komplett (11 908 höger, 11 909 vänster)
14 907	Fotstöd förlängda sb45-52 par komplett (14 908 höger, 14 909 vänster)
14 903	Fotstöd avkortade sb45-52 par komplett (14 902 höger, 14 901 vänster)
21 907	Fotstöd standard sb38 par komplett (21 908 höger, 21 909 vänster)
24 907	Fotstöd förlängda sb38 par komplett (24 908 höger, 24 909 vänster)
31 907	Fotstöd avkortade sb38 par komplett (31 908 höger, 31 909 vänster)
36 750	Benstödsrör avkortat höger (krävs för kort benstödshöjd)
36 755	Benstödsrör avkortat vänster (krävs för kort benstödshöjd)
36 762	Benstödsrör 90° avkortat höger (krävs för kort benstödshöjd)
36 761	Benstödsrör 90° avkortat vänster (krävs för kort benstödshöjd)
36 760-1	Benstödsrör 90° avkortade inkl 5" länkhjul och länkhjulsadapter (höger och vänster)

Vidare hänvisning

Benstöd standard och vadstöd standard	Se infoblad 11
Benstöd 90°	Se infoblad 17
Benstöd rak modell	Se infoblad 18

Reservdelslista / Sprängskiss Blad: D 4.1