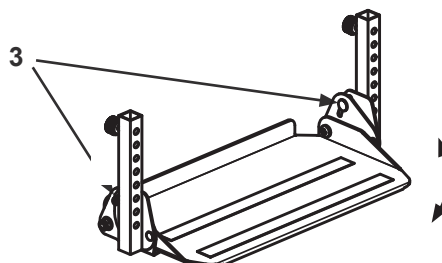


# Fotstöd, helt

**Infoblad nr. 14**

**BILD 1.** Rullstol med helt fotstöd.

**BILD 2.** Fotstödet med muttrar för vinkelinställning markerade.

## Helt fotstöd

Helt fotstöd kan användas på rullstolar tillverkade innan 2003-09-08 om nya knäleder monteras. För rullstolar tillverkade efter ovan datum kan helt fotstöd användas på befintliga avtagbara benstödsrör. För att förenkla justeringen av benstödsvinkel kan enhandsreglage (2) monteras på rullstolen. Bild 1. Den hela fotplattan är höj och sänkbar med snäpplås (1). Den är uppfällbar framåt/uppåt mot benställningen, vilket underlättar i- och urstigning.

Fotplattans vinkel kan regleras genom att muttrarna (3) vid fotplattans infästning lossas och önskad fotvinkel ställs in och muttrarna dras åt, bild 2. Verktyg – fast nyckel 10 mm.

Hållarna till fotplattorna finns i tre olika längder; standard, förlängda (+10cm) och avkortade/barn (-8cm).

Helt vadstöd ( ingår ej i artikeln hel fotplatta ) monteras på benstödsrören enligt bild 1. Helt vadstöd går att justera i höjd längs benstödsröret, i djup totalt åtta cm samt vinkeljusteras.

## Mått

Fotplatta sb 52	Bredd 48 cm	djup 22 cm
Fotplatta sb 45	Bredd 41 cm	djup 22 cm
Fotplatta sb 38/barn	Bredd 34 cm	djup 22 cm
Fotplattans vinkel	95° - 120° ( fotplatta till benstödsrör )	
Vadplatta till rullstol sb 45:	Bredd 35 cm	höjd 19 cm
Vadplatta till rullstol sb 38:	Bredd 28,5 cm	höjd 19 cm
Vadplatta till rullstol barn	Bredd 28,5 cm	höjd 15,5 cm

Avstånd sitsdynans överkant/fotplatta

Standard	40 - 54 cm
Förlängda	50 - 64 cm
Avkortade	33 - 41 cm (förutsätter avkortade benstödsrör)

## Fotplattspolstring

För brukare som sitter i rullstolen utan skor finns mjuk polstring som tillbehör till Fotstöd helt och Fotlåda.


**BILD 3.**  
Fotplattspolstring

# Fotstöd, helt

**Infoblad nr. 14****Rekommendation**

Till äldre rullstolar tillverkade före 2003-09-08 rekommenderas att rullstolarna uppdateras med nya knäleder och enhandsreglage/benstödslåsning istället för hel benställning (2008-01-30).

**Tänk på**

Att nya knäleder måste monteras på rullstolar tillverkade före 2003-09-08 för att hel fotplatta och hel vadplatta skall kunna användas. Helt fotstöd och helt vadstöd kan på nyare rullstolar användas med de befintliga benstödsrören. För att enkelt kunna justera benstödsvinkeln kan nyare rullstolar behöva kompletteras med enhandsreglage/benstödslåsning.

Det går även att få avkortade respektive förlängda fotplattshållare på fotlåda/helt fotstöd.

**Art. nr. Benämning**

18950	Helt fotstöd sb 52 svart
11950	Helt fotstöd sb 45 svart
21950	Helt fotstöd sb 38 svart
31950	Helt fotstöd barn svart
14950	Helt fotstöd sb 45 förlängd, svart
24950	Helt fotstöd sb 38 förlängd, svart
18510-1	Helt vadstöd sb 52 svart
12510-1	Helt vadstöd sb 45 mörkgrå (Till stolar efter 20030908)
22510-1	Helt vadstöd sb 38 mörkgrå (Till stolar efter 20030908)
32510-1	Helt vadstöd barn mörkgrå (Till stolar efter 20030908)
14960	Fotplattshållare höger förlängd, svart
14970	Fotplattshållare vänster förlängd, svart
30960	Fotplattshållare höger barn/kort, svart
30970	Fotplattshållare vänster barn/kort, svart
16716	Knäled vänster komplett
16726	Knäled höger komplett
18775-1	Benstödslåsningssats sb52 (Enhandsreglage)
16775-1	Benstödslåsningssats sb45 (Enhandsreglage)
26775-1	Benstödslåsningssats sb38 (Enhandsreglage)

**Vidare anvisningar:**

Fotlåda Se infoblad 15

**Reservdelslista / Sprängskiss : Blad D 2.1, D 4.2 och D 5.2.**