

Fotlåda

Infoblad nr. 15

BILD 1. Rullstol med fotlåda.

Fotlåda

Fotlådan är hög och sänkbar med snäpplås (1), se bild 1. Fotvinkeln är fast 95°. Fotlådans sidostöd och vadstöd är fast monterade och mjukt polstrade.

Mått

Storlek

Fotplatta sb 52	Bredd 48 cm, djup 22 cm
Fotplatta sb 45	Bredd 41 cm, djup 22 cm
Fotplatta sb 38/barn	Bredd 34 cm, djup 22 cm

Avstånd sitsdynans överkant/fotplatta

Standard	40 - 54 cm
Förlängda (special)	50 - 64 cm
Avkortade (special)	33-41 cm
Barn	33 - 41 cm

Fotplattspolstring

För brukare som sitter i rullstolen utan skor finns mjuk polstring som tillbehör till Fotstöd helt och Fotlåda.

BILD 2.
Fotplattspolstring


Tänk på

Att nya knäleder (art. nr. se infoblad 14, hel fot/vadplatta), måste monteras på rullstolar tillverkade före 2003-09-08 för att fotlåda skall kunna användas. På stolar efter ovan datum kan fotlåda användas på befintliga avtagbara benstödsrör. För att förenkla justeringen av benstödsvinkel kan dessa stolar kompletteras med enhandsreglage (art. nr. se infoblad 14). Det går även att få fotlådan förlängd eller avkortad i specialutförande.

Fotlåda används till brukare som behöver skydd vid ofrivilliga fot- och benrörelser.

Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
18 920	Fotlåda sb 52 svart (Efter förfrågan)
16 910	Fotlåda sb 45 mörkgrå
26 910	Fotlåda sb 38 mörkgrå
16 911	Fotlåda sb 45, förlängd
26 911	Fotlåda sb 38, förlängd
16 912	Fotlåda sb 45, avkortad
36 910	Fotlåda sb 38, avkortad/barn mörkgrå
26 939-1	Polstring hel fotplatta, sb 38
16 939-1	Polstring hel fotplatta, sb 45

Vidare anvisningar:

Fotstöd, helt Se infoblad 14

Reservdelslista / Sprängskiss : **Blad D 4.3**