

Ryggförlängare

Infoblad nr. 26



BILD 1. Ryggförlängare på rullstol.



BILD 2. Ryggförlängare sedd bakifrån.

Ryggförlängare

Ryggförlängaren är tänkt att användas till långa personer i de fall när standardryggstödet höjd inte räcker. Standardryggstödet går att justera mellan 52-59 cm i höjd. Med ryggförlängaren ökar ryggstödhöjden + 24 cm. Ryggförlängaren monteras i huvudstödsfästet (som är standard) på ryggens baksida, se bild 2.

Ryggförlängaren kan enbart regleras i höjd.

Klädseln är avtagbar och tvättbar i 60° och monteras med kardborrband.

Mått

Storlek: höjd 24 cm, bredd 43 cm, djup 6 cm

Tänk på

Ryggförlängaren fungerar inte med Flexi ryggsystem.

Ryggförlängare och huvudstöd går ej att kombinera.

Ryggförlängaren kan användas som ett huvudstöd, detta kräver att ställrör till huvudstöd monteras.

Vidare anvisningar:

Reservdelstlista / Sprängskiss : Blad F 5.3

Artikelnummer

| Art. nr. | Benämning |
|----------|--|
| 12 805-1 | Ryggförlängare, sb45 och sb38, blå klädsel |
| 12 806-1 | Ryggförlängare, barn |
| 45 485 | Klädsel till ryggförlängare, baksida, mörkgrå vinyl med kardborrband |
| 45 486 | Klädsel till ryggförlängare, framsida, tyg blått med kardborrband |