

Bålstöd

Infoblad nr. 27


BILD 1.

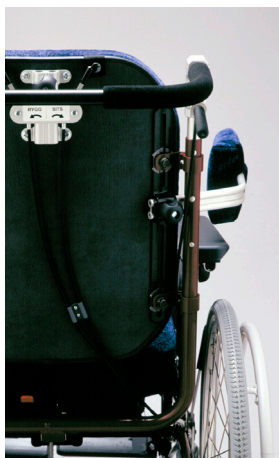


BILD 2.



BILD 3.

Bålstöd

Bålstöden användes som stöd mot bålen för att ge ett stabilare sittande. Bålstöden finns i tre olika utföranden, med standardbygel, med rak bygel och vinkelställbart.

Bålstöd med standardbygel används med fördel till en mindre eller smalare brukare och finns med liten, stor eller liten tunn bålstöds kudde.


Bålstöd med rak bygel används med fördel till en större eller kraftigare brukare och finns med liten, stor eller liten tunn bålstöds kudde.

Vinkelställbart bålstöd används till brukare som lutar åt sidan och snett framåt. Detta finns i en kort variant för små till mellanstora brukare och i en lång variant för mellanstora till stora brukare.

Klädseln är avtagbar och tvättbar i 60° och monteras med kardborrband.


Fästen finns normalt på ryggens baksida, höger och vänster. Bålstöden kan regleras individuellt i höjd och bredd. Intällning ca 9 cm i höjd med hjälp av justering av bålstödsfästet. Verktyg 13 mm fast nyckel.

Mått [cm]	höjd	djup	tjocklek
Bålstöd med bygel, litet.	14	15	3
Bålstöd med bygel, stort.	17	18	4,5
Bålstöd med bygel, litet tunt	14	15	1,5
Bålstöd vinkelställbart, kort	12,5	22	2,5
Bålstöd vinkelställbart, långt	12,5	27,5	2,5

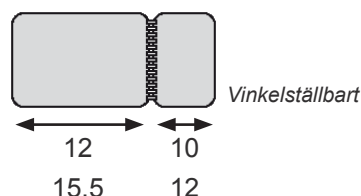

Swing-modell

Bålstöd tunt litet samt Bålstöd vinkelställbart finns även som Swing-modell (a), vilket tillåter att man med en knapptryckning lätt svänger bort bålstöds kudden t ex i en förflyttningssituation (b). Swing-bålstöden kan även ställas i valfri vinkel mot brukarens kropp (c). Denna vinkel justeras med medföljande insexnyckel.

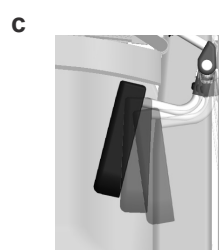

Bålstöd

Infoblad nr. 27

Tänk på

Om rullstolen är utrustad med Formryggdyna eller Flexiryggdyna kan tunt bålstöd användas utanför ryggdynans vinge för att ge ett mer fördelat stöd mot brukarens bål.

Bålstöd tunt litet tar mindre plats mellan brukarens bål och överarm, mindre risk att det hindrar brukarens armrörelser.


Bålstöd med rak bygel kan användas som stöd mot utsidan av brukarens arm för att förhindra att den glider utanför armstödsdynan.

Observera att användning av bålstöd kräver noggrann utprovning för att brukaren ska få bra stöd och att bålstödet inte ska orsaka tryck som kan leda till skada. Undvik att placera bålstöd nära brukarens armhåla då området generellt anses vara intimt och tryckkänsligt.

Vinkelställbart bålstöd kan användas för att ge stöd både från sidan och framifrån, mer info finns i produktblad till vinkelställbart bålstöd.

Inställningsmått enl. bild 4. Alla mått i cm:

	A min	A max	B min	B max
Sittbredd 45 cm				
Std bygel, liten kudde	29	47	25	38
Std bygel, stor kudde	24	42	26	39
Rak bygel, liten kudde	41	59	25	38
Rak bygel, stor kudde	37	55	26	39
Sittbredd 38 cm				
Std bygel, liten kudde	22	40	25	38
Std bygel, stor kudde	17	35	26	39
Rak bygel, liten kudde	34	52	25	38
Rak bygel, stor kudde	30	48	26	39

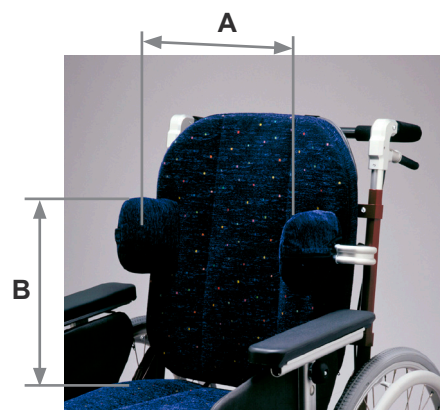
BILD 4.

För barnstolar gäller ungefär samma mått som sittbredd 38 cm.

Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
13 163-1	Bålstöd med std bygel, litet, blå klädsel
13 163-7	Bålstöd med std bygel, litet, svart Dotcomklädsel
13 162-5	Bålstöd med std bygel, litet, Dartexklädsel
13 168-1	Bålstöd med std bygel, stort, blå klädsel
13 168-7	Bålstöd med std bygel, stort, svart Dotcomklädsel
13 167-5	Bålstöd med std bygel, stort, Dartexklädsel
13 145-1	Bålstöd med rak bygel, litet, blå klädsel
13 145-7	Bålstöd med rak bygel, litet, svart Dotcomklädsel
13 145-5	Bålstöd med rak bygel, litet, Dartexklädsel
13 155-1	Bålstöd med rak bygel, stort, blå klädsel
13 155-7	Bålstöd med rak bygel, stort, svart Dotcomklädsel
13 155-5	Bålstöd med rak bygel, stort, Dartexklädsel
13 146-1	Bålstöd tunt litet med rak bygel, blå klädsel
13 146-7	Bålstöd tunt litet med rak bygel, svart Dotcomklädsel
13 146-5	Bålstöd tunt litet med rak bygel, Dartexklädsel
13 164-1	Bålstöd tunt litet med std bygel, blå klädsel
13 164-7	Bålstöd tunt litet med std bygel, svart Dotcomklädsel
13 164-5	Bålstöd tunt litet med std bygel, Dartexklädsel
13 151-1	Bålstöd vinkelställbart, kort, blå klädsel
13 151-5	Bålstöd vinkelställbart, kort, Dartexklädsel
13 152-1	Bålstöd vinkelställbart, långt, blå klädsel
13 152-5	Bålstöd vinkelställbart, långt, Dartexklädsel
45 431	Klädsel till bålstöd, litet, blå klädsel

Bålstöd

Infoblad nr. 27

47 431	Klädsel till bålstöd, litet, svart Dotcom
44 431	Klädsel till bålstöd, litet, Dartex
45 432	Klädsel till bålstöd, stort, blå
47 432	Klädsel till bålstöd, stort, svart Dotcom
44 432	Klädsel till bålstöd, stort, Dartex
45 433	Klädsel till bålstöd tunt litet, blå
47 433	Klädsel till bålstöd tunt litet, svart Dotcom
44 433	Klädsel till bålstöd tunt litet, Dartex
13 190-5	Bålstödsfäste, par
13 191-2	Bålstödsfäste, höger
13 191-3	Bålstödsfäste, vänster
13 192-5	Bålstödsfäste, par mod. flexi bred

För artikelnummer till Swing-bålstöd, se dokument 95 348 "HD Balance-tillbehör som passar till HD-stolen och Humlan".

Vidare anvisningar:**Reservdelsslista / Sprängskiss Blad F 3.1 och F 3.2**