

Hemiplegiarmstöd

Infoblad nr. 29


BILD 1.



BILD 2.

Hemiplegiarmstöd

Hemiplegiarmstödet är avsett att monteras på HD-rullstolar, (ej barnstolar) som alternativ till standardarmstöd. Armstödet (med sidostöd) monteras i sidostödsfästet på samma sätt som standardarmstöden, på höger, vänster eller båda sidor.

Armstödet är reglerbart i höjd ca 19-26 cm, djup 10 cm bakåt och 12 cm framåt och steglöst ställbart till maximal inåt- eller utåtrotation, se bild. Det kan också monteras 2 cm närmare eller 2 cm längre ut från kroppen, genom att flytta beslaget under armstödet.

Armstödsdynan är skålad och ger underarmen en mjuk avlastning och för handen finns det utrymme att sträckas ut.

Monteringsanvisning medföljer

Mått

Armstödsdynans mått: höjd 6 cm, bredd 18- 13 cm, djup 50 cm.
 Avstånd sitsdynan till hemiplegiarmstödet ovansida: ca 19-26 cm

Tänk på

Armstödet går inte att kombinera med ett rullstolsbord.

Armstödet skall inte ställas högre än att minst 8 cm av ställröret är nedstucket i fästet.

Armstödet skall inte belastas och användas som stöd vid förflyttning i och ur rullstolen

Hemiplegiarmstöd utan sidostöd, art.nr. 13301, kan användas med sidostöd tillverkade till 2002-06-30 då som ersättning till standard armstödsplatta, men blir då 4 cm högre i lägsta läge än hemiplegiarmstöd komplett enl. art. nr. nedan.

Vidare anvisningar: Monteringsanvisning

Reservdelslista / Sprängskiss : Blad E 1.2

Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
13 303	Hemiplegiarmstöd, vänster komplett med sidostöd
13 304	Hemiplegiarmstöd, höger komplett med sidostöd
13 301	Hemiplegiarmstöd höger/vänster, utan sidostöd
46 493	Vinylklädsel, mörkgrå
13 341	Sidostöd vänster, komplett
13 342	Sidostöd höger, komplett