

Väskkrok

Infoblad nr. 33

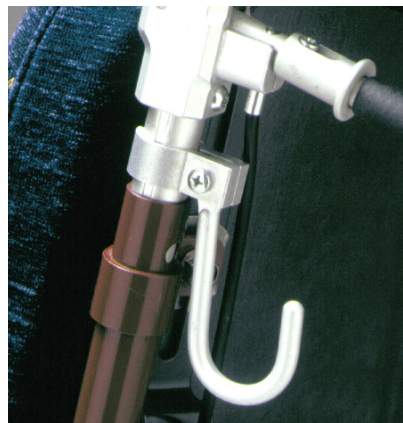


BILD 1. Väskkrok monterad på rullstol

Väskkrok

Väskkroken (a) monteras på körandagsröret som går ner i ryggramen, se bild.

Tänk på

Vid montering och användning av väskkroken, se till att bromsvajrarna inte skadas. Tipprisen ökar om rullstolens sits och/eller rygg vinklas bakåt och väskkrokarna belastas.

Väskkrokarna bör inte belastas med mer än 5 kg totalt.

Rullstol med utökad sits och ryggvinkling ska inte utrustas med väskkrokar.

Rullstolens körbygel kan inte ställas i lägsta körläge om väskkrok och axelstöd är monterade på samma sida.

Kontrollera att rullstolen är utrustad med tippskydd och att de är utdragna.

Det ligger på vårdaren/användarens ansvar att kontrollera tipprisen och se till att tippskydd används.

Vidare anvisningar:

Reservdelslista / Sprängskiss : Blad F 6.1

Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
----------	-----------

13 605	Väskkrok (1 st)
--------	-------------------

13 605-1	Väskkrokar, par
----------	-----------------