

Transportfästen

Infoblad nr. 34

BILD 1. Transportfästen på HD 500

BILD 2. Transportfästen på HD 650

Transportfästen

Transportfästen (a) kompletterar HD-rullstolen med fästpunkter för spännremmar vid transport i färdtjänstbuss. Enligt trafiksäkerhetsverkets rekommendationer skall rullstolar förankras i bussens fasta golvbeslag.

För att undvika skador på rullstolen vid fastspänningen finns rekommendationer i HD-rullstolens bruksanvisning att remmarna skall läggas runt hjulramens sidorör.

För att ytterligare förenkla fastspänningen finns transportfästen som ger en tydlig anvisning om var remmarna skall dras fast.

HD-rullstolen är testad och godkänd i krocktest enl. ISO 7176/19 med dessa transportfästen monterade.

Tänk på

Transportfästen får endast monteras på rullstolens hjulram.

Transportfästen är endast avsedda att fixera rullstolen vid färd i fordon.

Säkerhetsbälten för rullstolsanvändaren måste alltid fästas direkt i fordonet, i fästpunkter avsedda för detta.

Spännband ska endast hålla kvar rullstolen i position och inte dras åt för hårt då skador på rullstolen kan uppstå.

Vidare anvisningar:

Bruksanvisning, art. nr.: 95 009

Förskrivarinformation, art. nr.: 95 131

Monteringsanvisning, art. nr.: 95 181

Reservdelslista / Sprängskiss : Blad F 6.1

Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
13 550	Transportfästen, sats 4 st
13 550-1	Transportfästen, sats 2 st