

Körbyglar och separata körhandtag


Infoblad nr. 42

Körhandtagssida standard

HD-stolen är som standard utrustad med körhandtagssidor med vårdarbroms (A).

Körhandtagssidorna är höj- och sänkbara i 3 lägen med hjälp av snäppknappar (B) i ryggramsrören. För att underlätta justering i höjd samt för att inte skada vajrarna till vårdarbromsen ska vajrarna dras fram/upp något innan justering av höjd görs.

Om vårdaren som ska köra stolen är lång finns förhöjda körhandtagssidor (+12 cm).

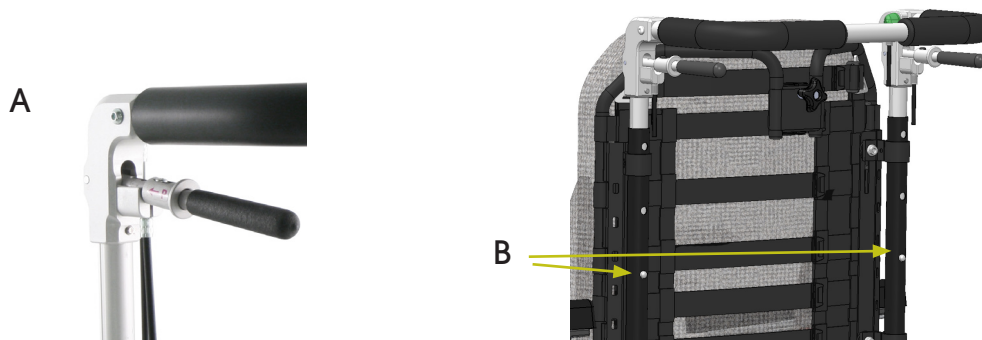


Körhandtagssida vinkelställbar

Vinkelställbara körhandtagssidor finns som alternativ (C). Dessa kan enkelt vinklas i 3 lägen utifrån brukarens sittposition och/eller vårdarens längd. Detta kan vara ett alternativ om man är flera personer som kör samma rullstol. OBS! Ej möjligt till Humlan sb 52.



Körbygel

Körbygel (D) tillhör standardutrustningen på HD-stolen. Den är klädd med ett mjukt körbygelsskydd i ett avtorkbart latexfritt material.

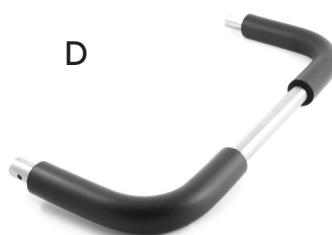

Körbyglar och separata körhandtag

Infoblad nr. 42

Alternativ

Som alternativ till standard körbygel finns körbygel extra djup, körbygel förhöjd bockad eller separata körhandtag.

Körbygel extra djup

Körbygel extra djup (E) är 8 cm djupare än standard och kan användas till exempel när HD-stolen är utrustad med drivaggregat. Detta medför bättre gångutrymme för vårdaren.



Körbygel förhöjd bockad

Körbygel förhöjd bockad (F) kan användas om brukaren mestadels körs i sitsiltat och/eller ryggfällt läge. Denna körbygel skall ej användas i kombination med förhöjd eller vinkelställbar körhandtagssida.



Separata körhandtag

Separata körhandtag (G) är ett alternativ om till exempel trappklättrare ska användas. Separata körhandtag ska fixeras med skruv för stabilitet i handtagen. Under snäpplåset finns ett förborrat hål där låsning kan ske, se Monteringsanvisning art. nr 95827. Separata körhandtag skall ej användas i kombination med vinkelställbara körhandtagssidor.



Mått

Körbyglar och separata körhandtag är ställbara i höjd, tre lägen.

Höjd, standard körhandtagssida	Min	Mellan	Max
Körbygel standard	103	110	117
Körbygel förhöjd 12 cm	115	122	129
Körbygel extra djup 8 cm	103	110	117
Körbygel förhöjd bockad	128	135	142

Mått: Från golv till överkant på körbygel. Rullstolens sits parallell med golvet. 90 grader mellan rygg och sits.

Tänk på

Om körbygel förhöjd 12 cm monteras på rullstol krävs att vajer och hölje till bromshandtag byts till längre utförande, art. nr. nedan.

Separata körhandtag bör fixeras med skruv för stabilitet i handtagen.

Separata körhandtag är ej möjligt i kombination med vinkelställbara körhandtagssidor.

Med separata körhandtag blir rullstolsryggen mindre stadig/styv än om körbygel används.

Körbyglar och separata körhandtag

Infoblad nr. 42**Artikelnummer:**

- 10 289-9 Körhandtagsrör förlängt +12 cm
- 13 836-5 Lång vajer + hölje till broms, +15 cm
- 10 299-1 Körhandtagssidor, vinkelställbara i tre lägen, komplett sats

- 10 283-1 Körbygel sb 45 std, med körhandtagsskydd
- 30 283-1 Körbygel sb 38 std, med körhandtagsskydd
- 18 283-1 Körbygel sb 52 std, med körhandtagsskydd

- 10 285-1 Körbygel extra djup +8 cm, sb 45, med körhandtagsskydd
- 30 285-1 Körbygel extra djup +8 cm, sb 38, med körhandtagsskydd
- 18 285-1 Körbygel extra djup +8 cm, sb 52, med körhandtagsskydd

- 10 286-1 Körbygel förhöjd bockad, sb 45, med körhandtagsskydd
- 30 286-1 Körbygel förhöjd bockad, sb 38, med körhandtagsskydd

- 10 290 Separata körhandtag, par, komplett
- 10 290-5 Separata körhandtag förhöjda +12 cm, par, komplett

- 13 712 Körbygelsskydd, par
- 13 712- 5 Körbygelskydd, 3 st (till Humlan sb 52)

Vidare anvisningar:**Reservdelslista: Blad C 4.1 och C 4.2**