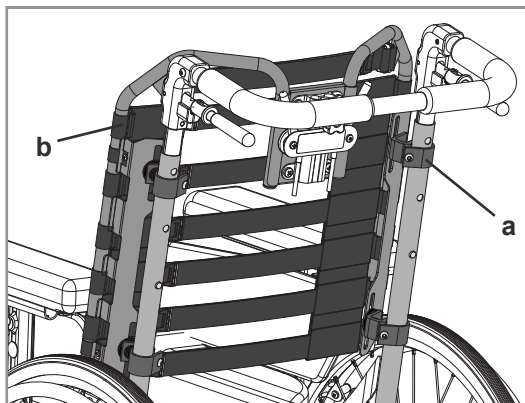
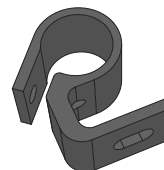
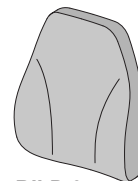
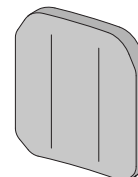


Rygg flexi, bred +7cm

Infoblad nr. 44

BILD 1. Flexiryggsystem

BILD 2.
Ryggöra flexi

BILD 3.
Ryggdyna sb45

OBSERVERA
att det är olika
ryggdynor till Flexi
sb45 och sb 52.


BILD 4.
Ryggdyna sb52

Rygg Flexi bred +7 cm

Rygg Flexi bred passar rullstolsanvändare med behov av ett bredare ryggstöd i kombination med smälare sittbredd. Till exempel användare med brett axel/skulderpari men med smalare höftbredd. Rygg Flexi bred + 7 cm (7 cm bredare än standard Flexi till respektive rullstolssittbredd) kan monteras på alla HD rullstolar med sittbredd 38 cm och 45 cm. Exempel: HD rullstol sittbredd 38 cm kan utrustas med Flexi rygg bredd 45 cm, rullstol sittbredd 45 cm kan utrustas med Flexi rygg bredd 52 cm. Monteringens görs genom att standardryggöronen (infästningen) i ryggramen byts till ryggöron Flexi (a i bild 1) samt att bredare Flexirygg (b) monteras, monteringsanvisning medföljer, se bilden.

Observera: Vissa tillbehör kan inte användas i kombination med Rygg Flexi bred +7 cm. Armstöden kan inte justeras i djup på samma sätt som med standard Flexi.

Tänk på:

- Flexi ryggdyna sittbredd 52 har en annorlunda utformning än sittbredd 38 och 45.
- Originalbålstödsfästen kan inte användas i kombination med bred flexi. Bålstödsfästen flexi (art nr nedan) ska användas istället. Dessa beställs separat.
- Axelstöd kan, beroende av inställd ryggstödshöjd, vara svårt att använda.
- När rullstolens ryggstöd är i 90° eller lite vinklad bakåt kan inte armstöden justeras i djup. Rygg Flexi bred + 7 cm hamnar utanför ryggramen och därmed kommer armstöden i konflikt med ryggen.
- Hantverksdesigns rekommendation är att armstöden inte ändras i djup även om det skulle vara möjligt i de fall ryggen vinklas bakåt. När ryggen vid ett senare tillfälle vinklas fram igen finns det risk att ryggen trycker fram armstöden och förstör mekanismen för djupreglering (om armstöden inte har justerats innan ryggen vinklas fram).
- Hantverksdesign tar inget ansvar för några skador om ovan rekommendation inte följs.
- Rullstolens sittdjup blir ca 2 cm kortare med ryggöron Flexi jämfört med ryggöron standard. Detta kan kompenseras genom att Flexiryggens ställbara kardborrband slackas och därmed skapas större sittdjup.

Artikelnummer

Art. nr.	Benämning
19202	Rygg Flexi sb52 till sb45, komplett sats
19202-8	Anpassning Rygg Flexi sb52 till sb45 (rygg monterad på ny rullstol)
19212	Rygg Flexi sb45 till sb38 komplett sats
19212-8	Anpassning Rygg Flexi sb45 till sb38 (rygg monterad på ny rullstol)
14254-1	Ryggöra Flexi, sats
13192-5	Bålstödsfästen Flexi, par

I ovan 19202 och 19212 ingår Flexi ram, Flexi ryggdyna samt ryggöron Flexi, inkl skruv.

För artikelnummer på klädsalar och dynor, se Infoblad 22.