

MONTERINGSANVISNING



RYGGDISTANSER Sats

för framflyttning av ryggstöd

Ryggdistanserna är avsedda att användas på HD-Rullstolar med vinylklädd ryggplatta för avtagbara ryggdynor.

Med satsen medföljer även islagsmuttrar om dessa saknas i ryggbrikan.

<u>Art.nr.</u>	<u>Benämning</u>
----------------	------------------

12 291-5 RYGGDISTANS 40 mm
12 292-5 RYGGDISTANS 25 mm

Satsen innehåller följande :


<u>Pos</u>	<u>Benämning</u>	<u>Antal</u>
1	Ryggdistanser	4
2	Islagsmutter	4
3	Skruv M8	4

Montering:

- Om ryggbrikan saknar islagsmuttrar (2) måste först de medföljande monteras. Dessa kan pressas fast i ryggbrikan genom att använda skruven (3) och distansen (1) från ryggbrikans baksida.
- Ryggbrikan skruvas fast med de 4 skruvarna (3) från ryggramens baksida genom spåren på ryggramens fästöron (6).

OBS! Bålstödsfästena (7) ska ligga mellan ryggbrickan (4) och ryggdistanserna (1).

- Fäst alla fyra skruvarna innan de dras åt.
- Rikta in ryggplattan (1), ställ bålstödsfästena (7) i önskad höjd och dra åt skruvarna.
- Kontrollera att plattan sitter stadigt.

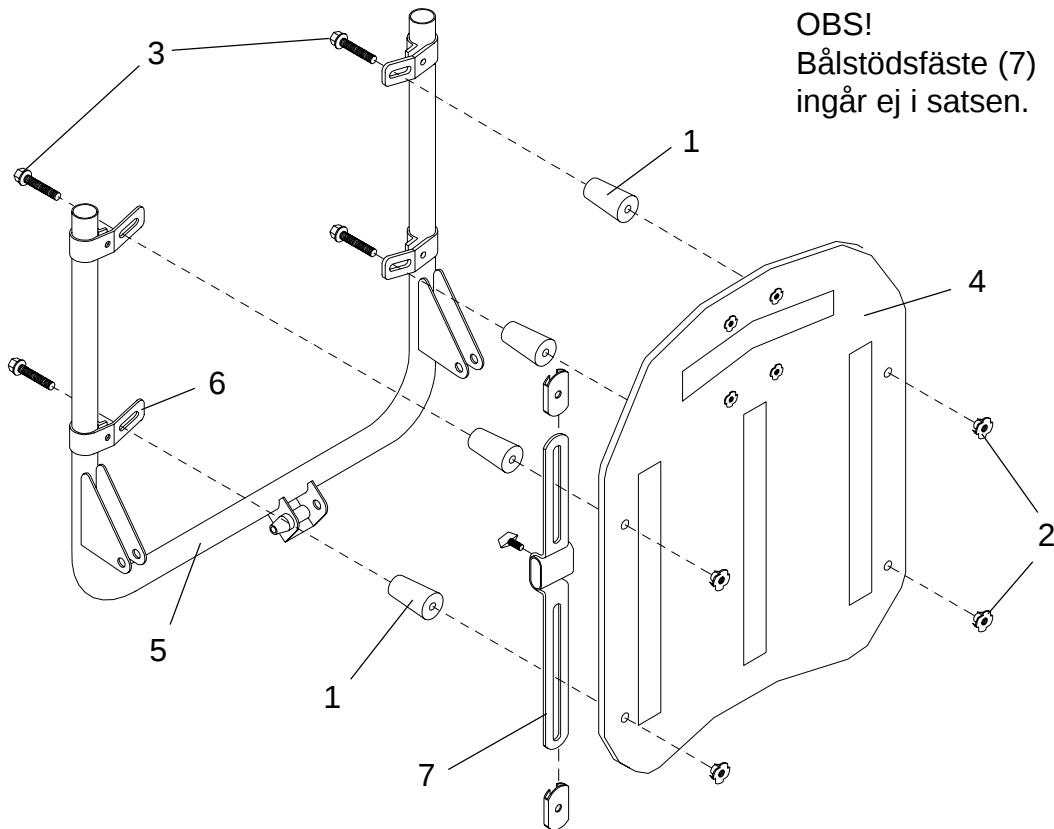

OBS!
Bålstödsfäste (7)
ingår ej i satsen.

RYGGDISTANSER SATS

Art.nr. 12 291-5



MONTERINGSANVISNING

För montering på ryggar med inbyggd ryggsplatta.

Satsen innehåller följande delar:

- | | |
|---------------------|------|
| 1. Ryggdistanser | 4 st |
| 2. Skruv | 4 st |
| 3. Inslagsmutter M8 | 4 st |

1. Demontera ryggstödet och ta av klädseln
2. Borra 4 nya hål, diam. 10mm, innanför de befintliga hålen, med centrumavstånd enl. tabellen nedan.
3. Sätt fast inslagsmutterarna i de nya hålen.
4. Montera klädseln och ta hål för de nya skruvarna.
5. Montera ryggen med distanserna.
Observera! Eventuella bålstödsfästen ska placeras direkt mot ryggstödet.

